

Instructions rapides - Thermomètres GLA M700

Attention : Le bouton-poussoir ne permet pas d'ALLUMER (ON) ou d'ÉTEINDRE (OFF) le M700

Le bouton rotatif correspond au bouton d'alimentation – Le BOUTON DE COMMANDE permet d'allumer (ON) le M700

Boutons :

Fonctions du bouton rotatif – quatre positions (bouton de commande)

0 – OFF – Éteint

I – CO – Température ambiante

II – PH – Maintien de la température maximum

III – F° (Fahrenheit) ou **C°** (Celsius) / Tension de la batterie

Positions indiquées sur la partie supérieure du M700

0	I	II	III
----------	----------	-----------	------------

Pour allumer l'unité (**ON**) – Positionnez le bouton de commande sur **I**

Pour utiliser la fonction de température ambiante (sonde connectée) – Positionnez le bouton de commande sur **I**

Indiqué par **CO**

Pour utiliser la fonction de maintien de la température maximum (sonde connectée) – Positionnez le bouton de commande sur **II**

Indiqué par **PH** (maintien de la température maximum)

Le point décimal clignote rapidement jusqu'à ce que la température maximale soit atteinte, puis maintenue

Bip lorsque la température maximale est atteinte

Pour voir la tension de la batterie – Positionnez le bouton de commande sur **III**

Pour éteindre l'unité (**OFF**) – Positionnez le bouton de commande sur **0**

Fonctions du bouton-poussoir

Pour tester le calibrage (sonde déconnectée) – Positionnez le bouton de commande sur

0 – La sonde ne doit **PAS** être connectée. Relâchez le bouton de commande, puis maintenez-le enfoncé – Le chiffre **100.0** devrait apparaître

Pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius – Positionnez le bouton de commande sur **III**

Relâchez le bouton de commande puis maintenez-le enfoncé pendant 18 à 20 secondes

Indiqué par **Fx.xx** (Fahrenheit) ou **Cx.xx** (Celsius) (x.xx correspond à la tension de la batterie)

Changement indiqué par un bip

Connecteurs :

Connecteur de la sonde

Raccordez la sonde M207 à ce connecteur

Si la sonde n'est PAS raccordée lorsque le bouton de commande est positionné sur **I** ou **II**, le message **Err1** s'affiche

Connecteur du chargeur

Raccordez le chargeur C725 à ce connecteur

Lorsque l'unité est éteinte, l'indicateur de chargement est un symbole tournant sur l'afficheur à DEL

Lorsque l'unité est allumée, l'indicateur de chargement est le point décimal tout à droite
IMPORTANT : vous devez charger le M700 avant sa première utilisation

Arrêt automatique

Le M700 s'éteindra (**OFF**) après 5 minutes lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour allumer l'unité (**ON**), positionnez le bouton de commande sur **I** ou **II**

Avertissement de batterie faible

Indiqué par le message **Err2** et des bips sonores rapides